



Destinataires



Personnes ayant des difficultés pour se pencher vers l'avant et/ou n'ayant pas la force pour écarter le bas de contention et l'enfiler.

Description

Le support permet de positionner le bas de contention écarté ce qui facilite ensuite sa mise en place sur la jambe. Il peut être utilisé par une personne seule si elle a de bonnes capacités motrices des membres supérieurs.

NOM	PHOTO	CARACTERISTIQUES	PRIX MOYEN	LIEUX DE VENTE
Enfile bas de contention JOBST Homecraft	 <p>Disponible à l'essai à ELSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Poignées fixes non étirables - Hauteur : 34.5cm 	Entre 25 et 55€	Sites internet, Revendeurs de matériel médical, Pharmacies
Enfile bas Easy-Slide pied ouvert – SIGVARIS		<ul style="list-style-type: none"> - Existe en 3 tailles en fonction de la pointure (small, medium ou large) - Selon la circonférence du pied le plus fort : Small : inférieur à 22 cm Médium : entre 22 et 25 cm Large : supérieur à 25 cm - Faible encombrement, pratique pour le transport - Mettre dans un premier temps le manchon vert. Le revêtement du manchon fait facilement glisser le bas de contention dessus. Mettre le bas de contention par-dessus le manchon vert. Le bas doit avoir le 	Entre 20 et 30€	Sites internet, Revendeurs de matériel médical



		bout du pied ouvert. Faire glisser le bas jusqu'à faire ressortir la languette du manchon vert. Tirer délicatement le manchon par la languette. Réajuster le bas de contention sur la jambe.		
Enfile bas de contention DONNER Homecraft	 Disponible à l'essai à ELSA	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur totale avec poignée : 56 cm - Poignées coulissantes et rétractables pour faciliter le rangement - Poignées rallongées pour éviter de se pencher en avant 	30€	Sites internet, Revendeurs de matériel médical, Pharmacies
Cadre enfile bas de contention - MYDELTECH		<ul style="list-style-type: none"> - Permet d'enfiler et de déenfiler le bas de contention - Positionner le bas sur le cadre, abaisser une ou plusieurs fois la partie jaune afin d'écarter le bas en fonction de la taille et enfiler sans aucun effort le bas. - Peut encombrant il est facilement transportable 	55€	Sites internet, Revendeurs de matériel médical

N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l'exhaustivité. La sélection effectuée par les ergothérapeutes du CRIAS se veut néanmoins représentative.

Financements possibles

PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

L'œil de l'ergothérapeute

Dispositifs qui nécessitent pour la plupart un temps d'apprentissage. L'enfile bas de contention existe avec des poignées de différentes longueurs. Il faut veiller à ce que celles-ci soient suffisamment longues si la personne a des difficultés à pencher le tronc vers l'avant.

