

Sangle de Rehaussement au Fauteuil ELINGUE

Mise à jour : novembre 2019



Destinataires

Personnes qui ont glissé dans leur fauteuil roulant et ne pouvant pas participer activement au rehaussement.

Description

La sangle ELINGUE permet de positionner une personne au fond du fauteuil. La face noire, agrippante, constitue le dessus et s'installe sous les cuisses de la personne assise. Les sangles noires se placent au niveau des accoudoirs du fauteuil. La personne aidante s'installe ensuite derrière le fauteuil et tracte alternativement sur les poignées pour accompagner petit à petit la personne au fond de l'assise. La sangle se retire entre les jambes de la personne.

Les dimensions de la sangle sont 42 x 32 cm et son poids est 150g. La charge maximale admissible est 130kg.



Prix moyen

58 €

Financements possibles

PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

Lieux de vente

Sites internet, revendeurs de matériel médical

L'œil de l'ergothérapeute

Son utilisation nécessite un temps d'apprentissage accompagné d'un professionnel compétant pour connaître les bases de manutention et éviter les accidents musculo-squelettiques.

