


Mis à jour : Février 2015

Fabricant : Natural Point, distribué par Proteor, Cimis

Descriptif : Caméra qui remplace l'usage de la souris en captant les mouvements de la tête grâce à une pastille réfléchissante collée sur le front ou les lunettes.

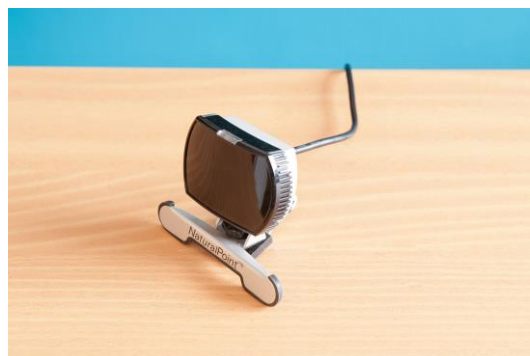

Destinataires : Personnes ayant une absence de motricité aux membres supérieurs (et inférieurs). La personne doit être en capacité de bouger sa tête.

Ergonomie :

- Caméra à poser/fixer au-dessus de l'écran
- Prise jack 3,5mm permettant de brancher un contacteur
- Logiciel d'installation offrant de nombreux réglages
- Pastilles de différentes formes, réutilisables
- Port USB

Les + du produit :

- Fourni avec un clavier virtuel et un logiciel de stationnement (permet le clic gauche après immobilisation)
- Fourni avec un T de dérivation (pour brancher 2 contacteurs)
- Sensibilité réglable selon les capacités motrices de l'utilisateur
- Signal infrarouge capté par la caméra lorsque l'ordinateur est en veille si l'utilisateur porte sa pastille

Les limite(s) du produit :

- Nécessite un temps d'apprentissage
- Besoin d'une tierce personne pour l'installation (coller la pastille, régler l'angle de la caméra, lancer le logiciel...)

Prix indicatif : 590 €

En + : L'accès au poste informatique adapté ne se réduit souvent pas à l'installation d'une caméra: l'ensemble des périphériques (clavier, écran...) devront être eux aussi adaptés aux possibilités de l'utilisateur. Cette adaptation nécessite une évaluation précise des capacités et besoins de la personne.