

Enfile bas de contention ROLLY

Mise à jour : août 2018

Destinataires

Personnes ayant des difficultés pour enfiler leurs bas de contention (passage du coup de pied essentiellement) ou soignants réalisant la mise et le retrait des bas de contention régulièrement. Ne convient pas pour une personne seule qui ne peut pas se baisser.

Description

Il facilite l'enfilage des chaussettes ou des bas de contention. Le bas est d'abord à enfiler à l'endroit sur l'avant-bras, puis il faut positionner le manchon au-dessus du bas sur le bras. Ensuite il suffit d'enrouler le bas autour du manchon en le faisant rouler vers la main. Une fois le bas enroulé sur le manchon, il faut le positionner devant le pied puis déroulé sur la jambe.

Une tierce personne peut aussi aider à enfiler le manchon sur la jambe.

Prix moyen

32€

Financements possibles

PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

Lieux de vente

Sites internet, revendeurs de matériel médical, pharmacies

L'œil de l'ergothérapeute

Cette aide technique nécessite un apprentissage pour son utilisation.

En option il existe un tapis antiglisse à positionner sur le sol pour enfiler le bas sans les mains.



Disponible à l'essai à ELSA

